



Pokretna kada za kupanje nepokretnih osoba

MODEL: BI100



UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

1. UVOD

Njihov dizajn i kvaliteta osiguravaju maksimalnu udobnost, sigurnost i pouzdanost. Tuš kolica su dizajnirana i proizvedena kako bi zadovoljila sve vaše potrebe za praktičnom, ispravnom i sigurnom upotrebom. Ovaj priručnik sadrži kratke upute za pravilno korištenje uređaja koji ste odabrali, kao i korisne savjete za vašu sigurnost. Preporučujemo da pročitate priručnik prije korištenja. U slučaju bilo kakvih nedoumica, obratite se svom prodavaču, koji će vam pružiti odgovarajuće savjete i pomoć.


2. NAMJENA

Tuš kolica su namijenjena za njegu pacijenata tijekom pranja/tuširanja, s površinom kade u horizontalnom ili nagnutom položaju, uz pomoć asistenta koji upravlja komandama i izvodi radnje pranja. Ne mogu se koristiti od strane jedne osobe.

3. OPĆA UPOZORENJA

- Uvijek provjerite postoje li oštećenja na strukturi koja bi mogla ugroziti ispravan i siguran rad proizvoda.
- Za pravilno korištenje uređaja, pridržavajte se ovog priručnika, s posebnom pažnjom na održavanje i upozorenja prije svake upotrebe.
- Za pravilno korištenje uređaja, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili terapeutom.
- Vijek trajanja uređaja određuje se prema istrošenosti dijelova koji se ne mogu popraviti i/ili zamijeniti.
- Uvijek obratite pažnju na prisutnost djece.
- Nemojte prekoračiti dozvoljenu nosivost, uključujući težinu vode za pranje.
- Nemojte otvarati bočne stranice, ni tijekom transporta ni tijekom pranja pacijenta.
- Nemojte čistiti agresivnim sredstvima poput amonijaka, izbjeljivača, kiselina i abrazivnih deterdženata.
- Nemojte opterećivati bočne stranice površine za kupanje težinom pacijenta.
- Postavite kolica u horizontalni položaj prije nego što pacijent sjedne ili siđe.

4. OPĆI OPIS

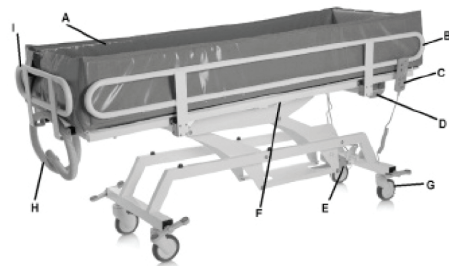

A. List za pranje

B. 180° sklopiva bočna ograda

E. Motorna jedinica za podizanje plana kupanja (hidraulika)

F. Aktivator nagiba stola za pranje (plinska opruga)

G. Kotači (s kočnicom i blokadom smjera kojom se upravlja putem bočnih papučica)

H. Odvodna cijev

I. Glava/noga bočno zaključana tračnica

5. PRIJE SVAKE UPOTREBE

- Uvijek provjerite ispravno zatvaranje bočnih stranica za zadržavanje. Ako bočne stranice nije moguće zatvoriti, proizvod se ne smije koristiti.
- Prije pranja ili premještanja pacijenta provjerite jesu li kotači zaključani, a bočne ograde podignute.
- Tijekom premještanja izbjegavajte prelazak preko prepreka koje bi mogle uzrokovati prevrtanje.

6. NAČIN KORIŠTENJA


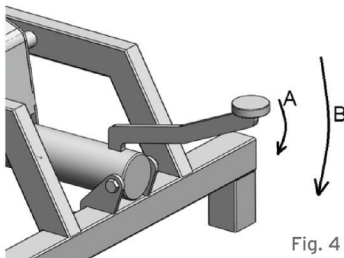


Fig. 4

Za sve hidraulične modele: Za podizanje kreveta na nosilima pritisnite pedalu za podizanje više puta kao na slici 4 (ref A), za spuštanje kreveta pritisnite pedalu za podizanje do kraja (ref B).

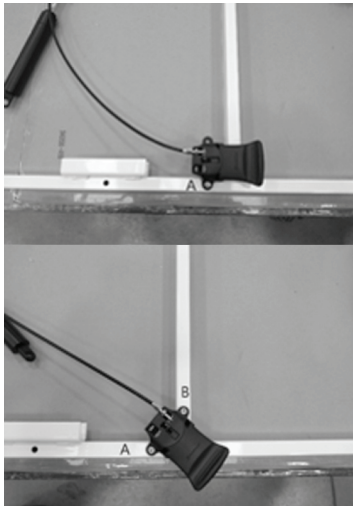

Za podešavanje nagiba stola za pranje, otpustite plinsku oprugu pomoću ručice koja se nalazi u središtu stola za pranje i izvršite nagib (ovu radnju obavite bez opterećenja na kolicima).

Odvijte vijak (A) vidljiv na fotografiji, okrenite ručku u smjeru kazaljke na satu i uklonite vijak (koji je u početku bio prekriven ručkom) iz odgovarajuće rupe.

Postavite ručku tako da se rupe (na ručki i na ravnini) podudaraju, a zatim umjereno pritegnite vijke (A i B) (kako ne biste ugrozili strukturu ručke).

6.1. Upotreba preklopnih bočnih ograda

Preklopne bočne ograde opremljene su osloncem s tri položaja i sigurnosnim vodičem protiv slučajnog otpuštanja, koji podupire bočne stranice i omogućuje njihovo sigurno i pravilno pričvršćivanje u tri predviđena položaja.



Opis položaja bočnih stranica i upute za njihovo rukovanje:

- Bočne stranice u podignutom položaju, s iglama umetnutim u «unutarnji» utor (Slika 11 i 11a). Lagano podignite bočne ograde objema rukama kako biste ih otključali.

- Bočne stranice u nagnutom položaju, do kojeg se dolazi laganim podizanjem bočnih stranica i povlačenjem malo unatrag, pri čemu se igle umeću u «vanjski» utor (Slika 12). Lagano podignite bočne ograde objema rukama kako biste ih otključali.



- Bočne stranice u spušenom položaju, do kojeg se dolazi laganim podizanjem bočnih stranica i okretanjem prema naprijed dok, nakon prolaska sigurnosnog vodiča, ne postane moguće izvući bočne

stranice daljnjim podizanjem i okretanjem prema natrag. Pratite pokret rotacije prema van iz oslonca dok se potpuno ne spuste, izbjegavajući nagle pokrete i udarce (Slika 13, 14).

- Za zatvaranje bočne ploče, izvedite gore navedene radnje obrnutim redoslijedom

UPOZORENJE!

- Uvijek provjerite ispravno zatvaranje bočnih stranica pomoću blokirajuće igle.
- Operater se ne smije oslanjati težinom na bočne stranice.
- Nemojte koristiti bočne stranice kao oslonac za kretanje pacijenta.
- Uvijek pomičite bočne stranice s obje ruke i provjerite da igle na obje strane ostaju paralelne i u istom položaju tijekom kretanja i u mirovanju (za lijevi i desni nosač) te da su, ako su podignute ili nagnute, obje igle smještene u isti utor.

6.2. Upotreba kotača



- Pritisnite papučicu dok ne čujete prvi «klik» kako biste aktivirali smjerno zaključavanje (za duge i ravne prijenose).
- Pritisnite papučicu dok ne čujete drugi «klik» kako biste potpuno zaključali kotače.
- Za pouzdano kočenje, potpuno zaključajte kotače na obje osi kolica.

7. ODRŽAVANJE

Kada se Mopedia by Moretti proizvod stavi na tržište, pažljivo se provjerava i označava CE oznakom. Za sigurnost pacijenta i liječnika preporučujemo da se ispravnost vašeg uređaja provjeri najmanje svakih 2 godine. U slučaju popravka, moraju se koristiti samo originalni rezervni dijelovi i originalni pribor.

- Vrlo je važno da se kolica provjere prije svake upotrebe. Posebno vas molimo da provjerite jesu li svi vijci i matice dobro zategnuti.
- Važno je da se kolica slobodno mogu kretati kad su kočnice na kotačima deaktivirane.
- Za pravilnu upotrebu provjerite kočnice na kotačima.
- Vrlo je važno periodički provjeriti jesu li povezni pinovi/mehanički spojevi i odgovarajući blokirajući prstenovi dobro postavljeni.
- Mehanički dijelovi moraju biti podmazani uljem kako bi se poboljšala fluidnost i otpornost na habanje. Obratite posebnu pažnju na mehanički uređaj za podizanje/naginjanje površine za pranje. Podmazujte kako je gore navedeno svakih 2 ili 3 mjeseca.

8. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpnu namočenu u vodu i osušite čistom suhom krpom, ili s toplom vodom i neutralnim sapunom.

UPOZORENJE!

Nemojte koristiti abrazivne tvari, kiseline, alkohol, sredstva na bazi klora, dezinficijense i aceton za čišćenje kolica, jer ove tvari mogu uzrokovati oštećenja plastičnih dijelova i hrđanje metalnih površina. Proizvođač neće biti odgovoran za oštećenja uzrokovana upotrebom materijala koji mogu korodirati dijelove proizvoda ili kemijskim korozivima tijekom čišćenja.

Ako je potrebno, izvršite sanitaciju blagim dezinfekcijskim deterdžentom.