

Kadica za pranje kose

1. Uvod

Prije uporabe proizvoda, prite da li oprema ima oštećenja koja bi mogla nastati tijekom transporta. Ako dođe do takve situacije, obratite se prodajnom mjestu. Zatim je važno pročitati sadržaj ovog priručnika koji sadrži važne informacije za korisnika.

2. Izvršenje

Prijenosni bazen za pranje glave na napuhavanje s PVC rupom za drenažu je mekan i udoban za korištenje. Dvostruke zračne komore štite od prolijevanja vode i pjene.

Set sadrži:

- Bazen
- Spremnik za vodu
- Tuš
- Odvodno crijevo
- Pumpa
- Držać spremnika

3. Primjena

Komplet za pranje glave omogućuje vam pranje glave pacijenta u ležećem položaju. Preporuča se posebno za kućnu upotrebu pri njezi ležećih osoba, kao i starijih osoba, kojima je teško nagnuti glavu i sagnuti se.

4. Kako koristiti

- Prvo trebate napuhati vodu u bazenu pomoću pumpe, a zatim zatvoriti odvodni ventil koji se nalazi na dnu bazena. Bazen se može napuniti toplom vodom ispod 50°C.
- Kombinirajte spremnik za vodu s tušem
- Spremnik treba napuniti toplom vodom na temperaturi koja ne prelazi 50 °C. Uz držać spremnika, spremnik se može objesiti na postolje ili zid.
- Pripremite kantu, a zatim unutra umetnite odvodno crijevo. Kako biste osigurali ispravan odvod vode, pazite da crijevo nema nabore.
- Stavite pacijentovu glavu u izrez za vrat, a zatim otvorite ventil za tuširanje kako biste podesili protok vode.
- Nakon pranja glave otvorite odvodni ventil tako da voda kroz odvodno crijevo teče u kantu.