

DIGITALNA VAGA NOSIVOSTI 225 KG



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: MM5253

Uputa za uporabu
VELIKA DIGITALNA VAGA
Model 5253

Hvala vam što ste kupili Momert proizvod. Nadamo se da ćete biti zadovoljni s našim proizvodom tijekom njegovog vijeka trajanja. Pažljivo proučite cijeli priručnik za uporabu prije nego što počnete koristiti proizvod. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu za buduće reference. Provjerite jesu li druge osobe koje koriste proizvod upoznate s ovim uputama.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

- Prilikom umetanja i zamjene pazite da slijedite označeni polaritet baterija.
- Ako uređaj duže vrijeme neće biti u upotrebi, izvadite baterije.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada se koristi.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dodijeljen nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Proizvod koristite samo prema namjeni koja je navedena u Priručniku za uporabu.
- Jedinicu koristite samo na stabilnoj vodoravnoj površini.
- Prije čišćenja, montaže ili demontaže poklopca, isključite jedinicu i izvadite baterije!
- Za čišćenje uređaja ne koristite abrazivne ili kemijski agresivne tvari.
- Ne koristite jedinicu ako ne radi ispravno ili je pala, oštećena ili izložena bilo kojoj tekućini. Odnesite jedinicu u ovlašten servisni centar na ispitivanje i popravak.
- Uređaj je prikladan samo za kućnu upotrebu. Nije predviđen za komercijalni rad.
- Uređaj držite podalje od izvora topline, kao što su radijatori, pećnice itd. Ne izlažite ga izravnom suncu ili vlazi.
- Ne dirajte jedinicu mokrim ili vlažnim rukama.
- Proizvod je krhak mjerni uređaj. Spriječite ga da padne ili se razbije.
- Ne popravljajte aparat sami. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Nepoštivanje uputa proizvođača može prouzrokovati odbijanje jamstva.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Četiri visoko precizna mjerna
- Automatsko vraćanje na početnu nulu
- Automatsko isključivanje
- Indikator slabe baterije
- Indikator preopterećenja

Tehnički parametri	
Napon	2 kom 3V CR2032 litijske baterije
Raspon vaganja	225 kg
Razmaci vaganja	100 g
Jedinice za vaganje	Kg, Lb, St
Radna/skladišna temperatura	20 - 25 °C / 15 - 40 °C
Veličina zaslona	Promjer LCD-a = 11,5 cm

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Uvjerite se da kod promjene baterije pratite označeni polaritet
- Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme izvadite baterije
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora za vrijeme upotrebe
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dodijeljen nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem
- Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu opisanu u Uputstvu za uporabu

- Uređaj koristite na ravnoj vodoravnoj površini
- Prije čišćenja, rastavljanja ili sastavljanja poklopca isključite uređaj i izvadite baterije
- NIKADA ne upotrebljavajte deterdžente, benzin, sredstvo za čišćenje stakla, sredstvo za poliranje namještaja i razrjeđivač boja ili druga kućna otapala za čišćenje bilo kojeg dijela vage
- Ovaj proizvod je precizan mjerni uređaj; čuvajte ga od lomljenja i padova

UPUTE ZA UPORABU:

1. Vaga uključuje litijeve zamjenske baterije. Prije prve uporabe obavezno maknite zaštitnu foliju ispod baterije (Sl. 1).
2. Postavite mjernu jedinicu (kg-lb-st) pomoću gumba UNIT.
3. Postavite vagu na tvrdi, ravnu površinu. (Ne koristite ga na mekoj površini).
4. Pritisnite vagu nogom. Po prvi puta na zaslonu će se pojaviti brojka "8", a nakon toga "0,00". Molimo pričekajte dok se ne prikaže "0,00" kg.
5. Zakoračite na vagu.
6. Vaša težina prikazati će se na ekranu trepereći dvaput. Izmjerena težina može se vidjeti oko 10 sekundi. Za točno mjerenje budite mirni tijekom mjerenja!



AUTOMATSKO GAŠENJE:

Kada siđete sa vage ona će se automatski ugasiti. Ako nije bilo mjerenja "0,00" će se prikazati na ekranu, a ona će se automatski ugasiti nakon otprilike 6 sekundi.

OSTALE INFORMACIJE O PRIKAZU:

Ako se nakon uključivanja prikaže "Lo" upozorenje (Sl. 2), ili na zaslonu nema ničega, baterije su prazne i treba ih zamijeniti.



PROMIJENITE BATERIJU:

Otvorite držač baterije na stražnjoj strani vage i pažljivo izvadite bateriju pritiskom na malu ploču srebrne boje kako biste izvukli bateriju iz držača baterije. Zamijenite slabu bateriju novom baterijom. Staru bateriju treba odložiti na za to odgovarajuće mjesto.

BATERIJE NISU UKLJUČENE U GARANCIJI!

Ako se na zaslonu pojavi znak "ERR" (Sl. 3.), to znači da je skala preopterećena, u ovom slučaju težina se mora smanjiti (preopterećenje može uzrokovati neispravnosti senzora).



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Površinu jedinice smije se čistiti samo vlažnom krpom. Ne koristite deterdžente ili tvrde predmete jer mogu oštetiti površinu jedinice!

Nikada ne čistite jedinicu pod tekućom vodom, ne ispirite ju i ne potapajte u vodu!

POPRAVAK I ODRŽAVANJE:

Svako veće održavanje ili popravak koje zahtijeva pristup unutarnjim dijelovima proizvoda mora izvesti stručni servisni centar.

ZAŠTITA OKOLIŠA:

- Trebalo bi reciklirati ambalažni materijal i zastarjele uređaje.
- Transportnu kutiju možete odlagati kao razvrstani otpad.
- Polietilenske vrećice predaju se na recikliranje.

Recikliranje uređaja na kraju radnog vijeka:



Simbol na proizvodu ili ambalaži ukazuje da ovaj proizvod ne smije ići u kućni otpad. Mora se odvesti do reciklažnog dvorišta za reciklažu električnih uređaja i opreme.

Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju negativnih učinaka

PROMIJENITE BATERIJU:

Otvorite držač baterije na stražnjoj strani vage i pažljivo izvadite bateriju pritiskom na malu ploču srebrne boje kako biste izvukli bateriju iz držača baterije. Zamijenite slabu bateriju novom baterijom. Staru bateriju treba odložiti na za to odgovarajuće mjesto.

BATERIJE NISU UKLJUČENE U GARANCIJI!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Površinu jedinice smije se čistiti samo vlažnom krpom. Ne koristite deterdžente ili tvrde predmete jer mogu oštetiti površinu jedinice!

Nikada ne čistite jedinicu pod tekućom vodom, ne ispirite ju i ne potapajte u vodu!

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao ekskluzivni uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom dvije godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja.

OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504 , E-mail: prodaja@medicaldirect.hr