



FOTELJA ZA STARIJE OSOBE

MODEL: PO430R



UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

1. UVOD

Hvala vam što ste odabrali podiznu fotelju iz MOPEDIA linije tvrtke Moretti. Podizne fotelje Moretti dizajnirane su i izrađene kako bi zadovoljile sve vaše potrebe za praktičnom, ispravnom i sigurnom upotrebom. Ovaj priručnik sadrži korisne savjete za pravilno i sigurno korištenje vašeg uređaja. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije nego što počnete koristiti kupljenu fotelju. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se svom distributeru za odgovarajuće savjete i pomoć.

2. NAMJENA

Podizne stolice MOPEDIA namijenjene su za sjedenje i odmor pacijenata u zatvorenom prostoru.

3. OPĆA UPOZORENJA UPOZORENJE!

Obratite posebnu pažnju na pokretne dijelove koji mogu uhvatiti udove i uzrokovati ozljede.

- Vijek trajanja uređaja određen je trošenjem dijelova koji se ne mogu popraviti i ne prelazi 10 godina.
- Pažljivo pročitate ovaj priručnik za pravilno korištenje uređaja.
- Uvijek se konzultirajte sa svojim liječnikom ili terapeutom za pravilno korištenje uređaja.
- Držite zapakirani proizvod dalje od izvora topline jer je pakiranje izrađeno od kartona.
- Uvijek budite oprezni u prisutnosti djece.
- Proizvođač i prodavatelj odriču se odgovornosti za štetu nanесenu ljudima, životinjama ili stvarima zbog radova koje su izvodile neovlaštene osobe ili zbog nepoštivanja ovog priručnika za uporabu.

UPOZORENJE!

Obratite maksimalnu pažnju na dolje navedena pravila ponašanja i sigurnosti kako biste izbjegli nesreće.

- Nemojte koristiti fotelju u vlažnim prostorima.
- Nemojte pušiti, koristiti otvoreni plamen, užarene predmete ili opremu koja može izazvati opasne iskre.
- Postavite fotelju na ravne i čvrste podne površine.
- Koristite originalne dodatke i/ili komponente.
- U slučaju kvara odmah isključite električni kabel iz utičnice i provjerite da kabl nije oštećen.
- Nemojte koristiti električne produžne kablove i/ili pomične utičnice.
- Fotelje nisu prikladne za istovremeno korištenje više osoba.
- Nemojte vaditi ili umetati utikač mokrim rukama.

4. OPĆI OPIS




Podizne fotelje, dizajnirane za odmor i opuštanje. Naslon i sjedalo imaju punjenje različitih gustoća, posebno oblikovano za održavanje pravilnog držanja tijela. Konstrukcija je izrađena od čelika s premazom, a presvučena je poliesterskom tkaninom. Fotelje su opremljene s dva neovisna motora koji omogućuju zasebno podešavanje naslona i podnožja, čime se postiže više različitih položaja, uključujući idealan položaj za čitanje, gledanje televizije, opuštanje i/ili poboljšanje probave. Fotelje također imaju funkciju podizanja zahvaljujući motoru koji osobi omogućuje podizanje. Uz ovaj podizni uređaj, osoba u sjedećem položaju dolazi gotovo do potpuno uspravnog položaja, što olakšava ustajanje. Različiti položaji naslona i podnožja podešavaju se praktičnim i jednostavnim daljinskim upravljačem s četiri tipke.

4.1 Prikaz i popis dijelova

1. Fotelja
2. Prednji kotači ili sustav valjaka
3. Ležeći naslon
4. Džep za pohranu
5. Daljinski upravljač
6. Dva motora za samostalne pokrete
7. Električni kabel

5. UPOZORENJA PRI UPORABI

- Priključite kabel izravno u električnu utičnicu. Nemojte koristiti produžne kabele.
- Ne stavljajte predmete, ne hodajte niti postavljajte kabel u blizini vrućih površina ili izvora topline.
- Priključite utikač u utičnicu i odspojite ga povlačenjem za utikač, a ne za kabel.
- Nemojte rukovati kabelom mokrim rukama ili odjećom te provjerite da je napon odgovarajući onome što je naznačeno na naljepnici uređaja.
- Nemojte oštetiti utikač i/ili električni kabel te ih nemojte koristiti ako su oštećeni.
- Prije sjedenja u fotelju provjerite da daljinski upravljač i njegov kabel nisu na putu.
- Kada se fotelja ne koristi, ostavite podnožje u zatvorenom položaju.
- Uvijek postavite fotelju na potpuno ravnu površinu, kako tijekom korištenja, tako i dok nije u uporabi, kako biste osigurali stabilnost i pravilno funkcioniranje.
- Nikada ne sjedajte na podnožje i izbjegavajte nasilno sjedenje na fotelji. Nemojte po njemu skakati.
- Osigurajte da osoba sjedi tako da težinu ravnomjerno rasporedi, bez obzira na položaj naslona.
- Za premještanje fotelje provjerite da nije u nagnutom položaju i podignite podnožje za najmanje 5 cm.
- Nemojte dopustiti djeci da nepravilno koriste uređaj i osigurajte odgovarajući nadzor ako djeca ili ovisne osobe koriste fotelju.
- Fotelja je namijenjena osobama dobrog tjelesnog i mentalnog zdravlja (osobe koje ne koriste alkohol ili droge te ne pate od mentalnih bolesti ili stanja koja uzrokuju halucinacije, gubitak ravnoteže ili slično).
- Držite ruke i noge podalje od spojnih točaka, poput mehanizama za podizanje fotelje i podnožja, te od praznina između naslona ili naslona za ruke.
- Nemojte koristiti uređaj ako su pokrovi poderani i dolazi do izlaganja unutarnjih dijelova.
- Nemojte koristiti mobitele ili prijenosna računala u blizini fotelje.
- Pripazite na male dijelove koji bi mogli biti progutani.
- Preporučuje se korištenje originalnih dodataka.
- Daljinski upravljač smije se koristiti isključivo dok osoba sjedi u fotelji.
- Nemojte koristiti fotelju u vrlo vlažnim prostorima, poput kupaonica, niti na otvorenom.
- Ne izlažite fotelju izravnom sunčevom svjetlu (UV zračenju) kroz dulji vremenski period.
- Presvlake proizvoda nisu dizajnirane da budu otporne na vatru.
- Nemojte pušiti na fotelji niti u njezinoj neposrednoj blizini.

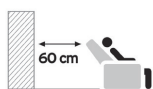

Postavite fotelju na 60 cm udaljenosti od zida




Nemojte sjediti na podnožju za noge



Sjediti pravilno s leđima naslonjenim na naslon



Nakon korištenja fotelje vratite naslon u uspravan položaj i zatvorite oslonac za noge prije ustajanja

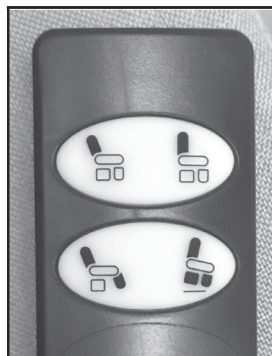

GORNJA LIJEVA TIPKA: pomiče fotelju iz uspravnog položaja u položaj spuštenog naslona



DONJA LIJEVA TIPKA: počevši od uspravnog položaja, pomiče fotelju u uspravni položaj; počevši od uspravnog položaja, izvlači oslonac za noge.



GORNJA DESNA TIPKA: vraća fotelju iz spuštenog položaja naslona u uspravni položaj.



DONJA DESNA TIPKA: pomiče fotelju iz uspravnog u položaj za ustajanje; počevši od izvučenog položaja oslonca za noge, vraća oslonac za noge u zatvoreni položaj.













6. OTKLANJANJE KVAROVA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
FOTELJA NE VRŠI POTREBNE POKRETE ZBOG MEHANIČKIH PROBLEMA	NEDOVOLJNO PROSTORA UNUTAR KRETANJA STOLCA	UKLONITE PREDMETE KOJI SPREČAVAJU KRETANJE ILI JE ODMAKNITE OD ZIDA
	PREDMET ZAKLJUČAN U MEHANIZMU ZA RUKOVANJE	POKUŠAJTE UKLONITI PREDMET BEZ OZLIJEĐIVANJA, U SLUČAJU DA JE TO PREOPASNO KONTAKTIRAJTE PRODAVAČA
PROBLEMI S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM	PROBLEMI S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM S «KLIKOM» TIJEKOM PRITISKA GUMBA	PROBLEM SE TIČE ELEKTRONIKE, ALI DALJINSKI UPRAVLJAČ RADI NORMALNO
	PROBLEMI S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM BEZ «KLIKA» TIJEKOM PRITISKA GUMBA	PROBLEM JE S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM I TREBA GA ZAMIJENITI
PROBLEMI U RUKOVANJU ZBOG ELEKTRIČNOG SUSTAVA	ELEKTRIČNI UTIKAČ NIJE SPOJEN ILI NIJE ISPRAVNO SPOJEN	SPOJITE UTIKAČ NA ELEKTRIČNU UTIČNICU
	OŠTEĆEN KABEL ILI UTIKAČ	KONTAKTIRAJTE SVOG TRGOVCA
	ELEKTRIČNE KOMPONENTE NISU ISPRAVNO SPOJENE	PROVJERITE SPOJEVE ELEKTRIČNIH KOMPONENTI

7. ČIŠĆENJE

Isključite utikač iz električne mreže prije čišćenja. Često čistite fotelju usisivačem. U slučaju tvrdokorne prljavštine, redovito koristite posebne nastavke za tkanine s mehaničkim komponentama za meko čišćenje kako biste ograničili nakupljanje prašine u okviru.

8. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

											
52	48	44	72	90	63	115	180	150	12	130	58

8.1. Tehničke značajke podizne fotelje

- Čelični okvir s praškastim premazom i drvena konstrukcija
- Tkanina vodoodbojna i otporna na mrlje
- Nezgnječiva poliuretanska pjena s diferenciranom gustoćom:
 - Naslon: 1822- kg/m³
 - Podnožje: 18 kg/m³
 - Sjedalo: 35 kg/m³
 - Nasloni za ruke: 40 kg/m³
- Dvostruko podnožje s mogućnošću produženja za 11 cm
- Naslon podesiv u više položaja
- Funkcije:
 - Total Relax – potpuno opuštanje
 - TV funkcija – idealan položaj za gledanje televizije
 - Stand up funkcija – pomoć pri ustajanju
 - Vertikalno podizanje (12 cm) – olakšava ulazak i izlazak iz fotelje
 - Krevet funkcija (180°) – naslon u potpuno ležeći položaj
 - Zero Gravity funkcija – podiže podnožje iznad naslona za bolju cirkulaciju krvi i limfe
 - Uklonjivi nasloni za ruke s mogućnošću umetanja pomoćnog stolića (ne dolazi sa foteljom)
 - Kotači sustava za premještanje, četiri kotača Ø 50 mm

- 2 neovisna motora s funkcijom Zero Gravity
- Daljinski upravljač s četiri tipke, s kabelom smještenim u bočni džep
- Napon: 230V – 110W
- Radna temperatura: -20°C do +60°C
- Preporučeni uvjeti skladištenja:
 - Čuvati na hladnom i suhom mjestu
 - Držati dalje od izravnih izvora topline, poput sunčeve svjetlosti
 - Preporučena temperatura skladištenja: -10°C do +40°C



PROTIV
GRINJA



OTPORNO
NA MRLJE



ANTIMIKROBNO I
ANTIBAKTERIJSKO



PROZRAČNO

JAMSTVO

Pravilna upotreba proizvoda navedena je u korisničkom priručniku. Medical Direct d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakve štete ili osobne ozljede nastale uslijed nepravilne montaže ili nepravilne uporabe uređaja. Nepravilna uporaba je svaka uporaba koja nije u skladu s ovim korisničkim priručnikom. Ovo jamstvo ne vrijedi u slijedećim slučajevima: prirodne katastrofe, neovlašteno održavanje ili popravci, štete uzrokovane problemima u opskrbi električnom energijom (ako su predviđeni), uporaba neoriginalnih dijelova, neovlaštene preinake ili oštećenja u transportu.

Jamstvo ne pokriva sastavne dijelove koji se istroše ako oštećenje nastane zbog uobičajene uporabe proizvoda i ne primjenjuje se u slučaju štete uzrokovane nepravilnom uporabom.

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom dvije (2) godine od dana kupnje što uključuje i bateriju. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.hr