



STOLAC ZA TUŠIRANJE S NASLONOM I RUKOHVATIMA

MODEL: RS839



UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

OPIS PROIZVODA

Stolac za tuširanje Moretti RS839 izrađen je od aluminijske konstrukcije s ergonomskim sjedištem i naslonom od polietilena visoke gustoće (HDPE). Opremljen je rukohvatima, protukliznim gumenim čepovima i podesiv po visini, čime omogućuje sigurnost i udobnost tijekom tuširanja.

SASTAVLJANJE PROIZVODA

1. Okrenite sjedište naopako i postavite dvije U-okvirne strukture nogu, učvrstite ih na sredinu sjedišta pomoću kratkih vijaka.
2. Umetnite nosače naslona i pričvrstite ih na sjedište i na nosače nogu pomoću dugih vijaka.
3. Pričvrstite naslon na njegove nosače pomoću preostalih kratkih vijaka.
4. Dodajte četiri noge i podesite ih na željenu visinu pomoću blokada.

PRIJE UPOTREBE

- Provjerite je li okvir oštećen.
- Provjerite jesu li svi dijelovi ispravno sastavljeni.
- Provjerite stabilnost stolca na ravnoj podlozi.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

- Podešavanje visine:
 1. Pritisnite sigurnosni gumb na svakoj nozi.
 2. Pomaknite cijev noge do željene visine.
 3. Provjerite jesu li sve četiri noge podešene na istu visinu i da je sigurnosni gumb pravilno postavljen.
- Korištenje:
 1. Prilikom ulaska na stolac uvijek osigurajte stabilnost – korisnicima sa smanjenom pokretljivošću preporučujemo asistenciju.
 2. Gumene protuklizne noge sprječavaju klizanje, no ipak budite oprezni na mokrim i skliskim površinama.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Čistiti blagim deterdžentom i toplom vodom pomoću mekane krpe.
- Ne koristiti abrazivne proizvode, kiseline, alkohol, sredstva na bazi klora ili acetona, jer mogu oštetiti površinu i uzrokovati koroziju.
- Po potrebi dezinficirati neutralnim sredstvom za dezinfekciju.
- Redovito provjeravajte stabilnost, čvrstoću spojeva i stanje zaštitnih elemenata.

SIGURNOSNE NAPOMENE

- Nemojte koristiti proizvod za korisnike čija težina prelazi maksimalnu nosivost od 136 kg.
- Budite oprezni na mokrim ili skliskim površinama.
- Ne ostavljajte proizvod vani, izložen vremenskim utjecajima.
- Ako imate bilo kakvu nedoumicu u vezi montaže, podešavanja ili održavanja, obratite se prodavatelju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Dimenzije: širina 46 cm, dubina 40 cm, visina 80–99 cm
- Dimenzije sjedišta: 41 × 34 cm, visina sjedišta 47–66 cm
- Materijal: aluminijski okvir, HDPE sjedište i naslon
- Protuklizne gumene noge
- Maksimalna nosivost: 136 kg