



SIGURNOSNA OGRADA ZA TOALET – SAMOSTOJEĆA

MODEL: RS908



UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

OPIS PROIZVODA

Sigurnosna samostojeća ograda za toalet Moretti RS908 izrađena je od obojanog čelika s podesivom širinom i visinom, namijenjena pružanju potpore osobama koje trebaju dodatnu sigurnost pri korištenju WC-a. Ograda ima mekano podstavljene rukohvate i protuklizne gumene čepove za veću stabilnost.

SASTAVLJANJE PROIZVODA

1. Spojite dvije bočne strane ograde pomoću poveznica (šipki).
2. Za pričvršćivanje koristite priložene kopče (stezaljke) i provjerite da su dobro učvršćene.
3. Kada je okvir u potpunosti sastavljen, podesite visinu nogu:
 - Pritisnite sigurnosni gumb na svakoj nozi.
 - Podesite visinu prema potrebi, pazeći da su sve četiri noge na istoj visini.
4. Provjerite stabilnost cijelog okvira i čvrstoću svih spojeva prije upotrebe.

PODEŠAVANJE DIMENZIJA

• Podešavanje širine:

Uklonite povezne šipke, pomaknite bočne okvire na željenu širinu, zatim ponovno pričvrstite šipke pomoću kopči.

• Podešavanje visine:

Na svakoj nozi pritisnite sigurnosni gumb, prilagodite visinu, i ponovno osigurajte gumbom.

PRIJE UPOTREBE

- Provjerite je li okvir pravilno sastavljen i jesu li sve kopče i gumbi dobro učvršćeni.
- Provjerite jesu li sve četiri noge iste visine i da ograda stabilno stoji na ravnoj podlozi.
- Provjerite stanje protukliznih gumenih čepova.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Čistiti blagim deterdžentom i toplom vodom pomoću mekane krpe.
- Ne koristiti abrazivne proizvode, kiseline, alkohol, sredstva na bazi klora ili acetona, jer mogu oštetiti površinu i uzrokovati koroziju.
- Po potrebi dezinficirati neutralnim sredstvom za dezinfekciju.
- Redovito provjeravajte stabilnost, čvrstoću spojeva i stanje zaštitnih elemenata.

SIGURNOSNE NAPOMENE

- Nemojte koristiti proizvod za korisnike čija težina prelazi maksimalnu nosivost od 136 kg.
- Budite oprezni na mokrim ili skliskim površinama.
- Ne ostavljajte proizvod vani, izložen vremenskim utjecajima.
- Ako imate bilo kakvu nedoumicu u vezi montaže, podešavanja ili održavanja, obratite se prodavatelju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Dimenzije: širina 62 – 71 cm, dubina 50 cm, visina 66 – 77 cm
- Materijal: obojani čelik, podstavljene rukohvate
- Protuklizne gumene noge
- Podesiva širina i visina
- Maksimalna nosivost: 136 kg